



Este Tutorial é destinado para a fabricação de máscaras hospitalares em Tecido-Não-Tecido (TNT) costuradas com duas (2) camadas de proteção.


1º Passo: Desenhar o molde a partir de um retângulo de 14x17cm em uma folha de papel.

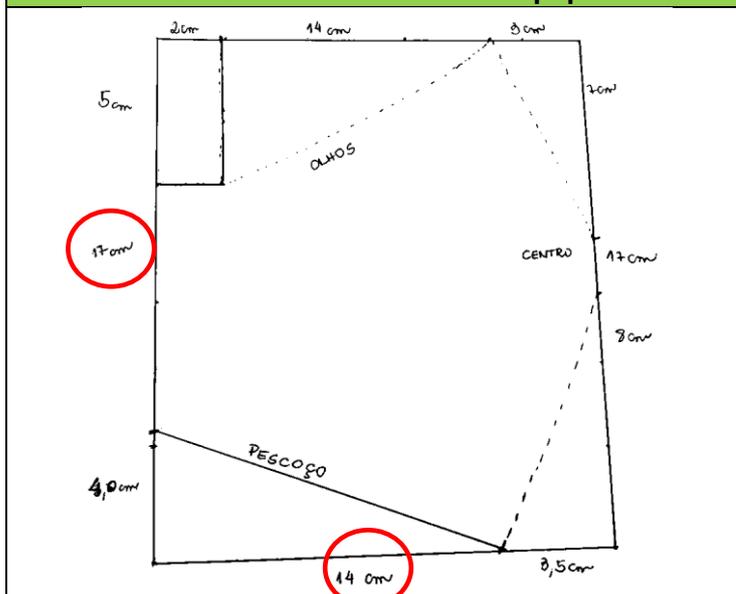

2º Passo: Recortar o molde.

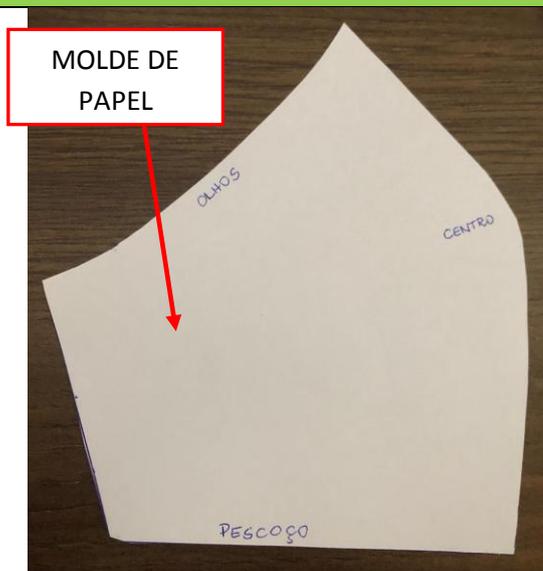


3º Passo: Cortar 4 peças utilizando o molde de papel.

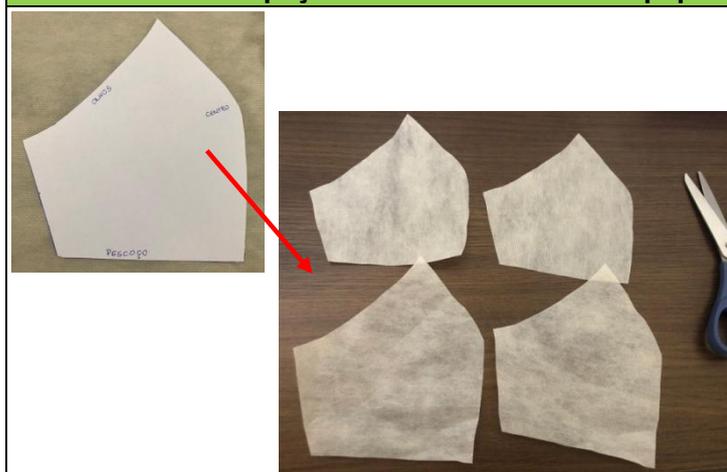

4º Passo: Juntar duas partes usando agulhas.



5º Passo: Costurar as partes.

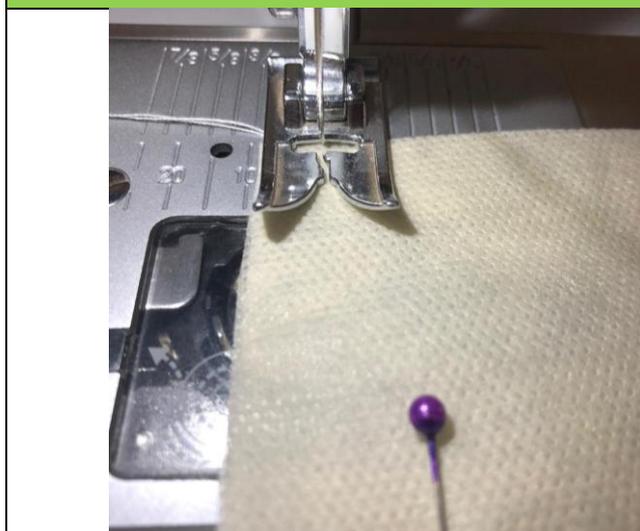

6º Passo: Após juntar dois lados, fazer uns piques com a tesoura para ficar mais ajustado. Repetir o procedimento com o outro par.



7º Passo: Sobrepor as duas faces costuradas, deixando o lado da costura para fora.



8º Passo: Costurar a parte superior e inferior da máscara.




9º Passo: As laterais ainda estarão sem costurar. Usar a abertura lateral para virar a máscara do avesso.



10º Passo: Ajeite a máscara e vire um dedo de pano para dentro nas laterais, conforme abaixo:



11º Passo: Corte 2 fitas de elástico com comprimento de 17 cm.

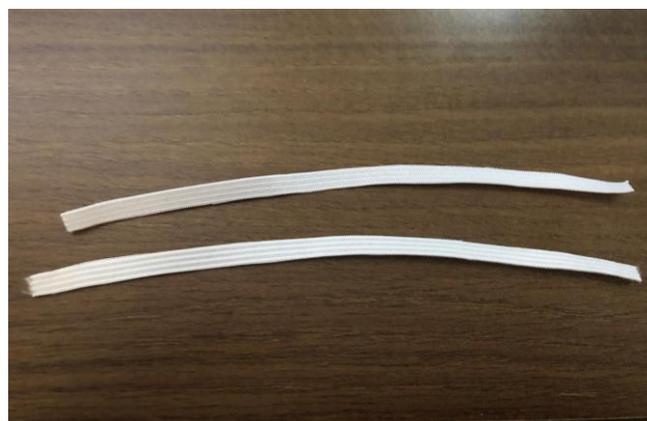

12° Passo: Coloque uma das pontas do elástico dentro e passe a costura. Note que ficou uma abertura no final.



13° Passo: Coloque a outra ponta do elástico para terminar a costura.



14° Passo: Repita a operação na outra lateral da máscara.



15° Passo: Sua máscara está pronta.

